

Rohnson[®]

Návod na použitie

MULTIFUNKČNÝ UV-C STERILIZAČNÝ BOX

S-1085 Sterilife



Pred použitím tohto prístroja sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Prístroj používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu prístroja nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie prístroja nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.

UPOZORNENIE

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a jeho napájací kábel udrzte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte prístroj, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami. Na prístroji nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Tento prístroj je určený iba na sterilizáciu predmetov. Nesmie byť použitý na ľudské telo.
- Počas sterilizácie musí byť box vždy riadne zatvorený.
- Zabráňte priamemu styku prístroja s vodou. Neponárajte prístroj ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Nevystavujte prístroj poveternostným vplyvom (napr. dažďu, výkyvom teplôt) a priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj je možné nabíjať pomocou USB kábla.

POPIS PRÍSTROJA

1. Prepínač sterilizácie
2. Prepínač aromaterapie
3. UV-C trubice
4. Otvor pre pridanie arómy

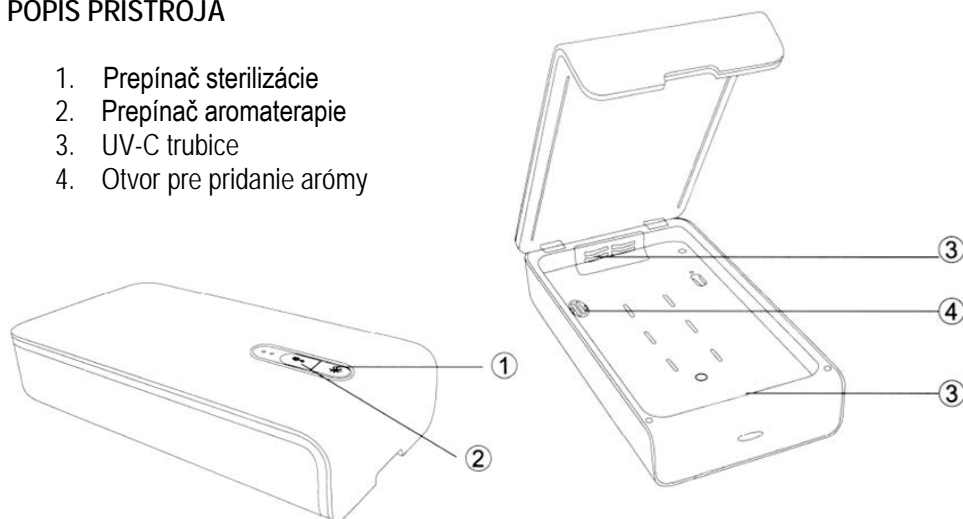

POUŽITIE PRÍSTROJA

- Otvorte sterilizačný box. Ak chcete využiť funkciu aromaterapie, nakvapkajte 3-6 kvapiek esenciálneho oleja do otvoru pre pridanie arómy.
- Vložte predmet, ktorý chcete sterilizovať, do boxu a zatvorte ho.

Upozornenie: Počas sterilizácie musí byť box vždy riadne zatvorený.

- Pre zahájenie sterilizácie prepnite prepínač do pozície sterilizácie. Proces sterilizácie bude automaticky dokončený po 5 minútach, alebo ho môžete kedykoľvek ukončiť opätovným prepnutím prepínača sterilizácie. Začatie a skončenie sterilizácie je sprevádzané hlasovou signalizáciou v anglickom jazyku "sterilization start" a "sterilization finish".
- Ultrafialové žiarenie ničí DNA a RNA mikroorganizmov a eliminuje tak baktérie, vírusy, mikróby a i.
- Pokiaľ chcete na predmet aplikovať arómu, prepnite prepínač do pozície aromaterapie. Funkcia aromaterapie je možné ukončiť opätovným prepnutím prepínača aromaterapie alebo počkať 8 minút na automatické dokončenie. Počas funkcie aromaterapie svieti svetelná indikácia aromaterapie. Začatie a

skončenie aromaterapie je sprevádzané hlasovou signalizáciou v anglickom jazyku "aromatherapy start" a "aromatherapy finish".

- Ak vôňa pri funkcii aromaterapie zoslabne, pridajte znovu esenciálny olej.
- Prístroj je možné nabíjať pomocou USB kábla alebo napájať powerbankou.

Upozornenie: Tento prístroj je určený iba na sterilizáciu predmetov. Nesmie byť použitý na ľudské telo!

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Povrch prístroja utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte prístroj ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	DC 5 V
Maximálny výkon	9 W
UV-C lampa	253,7 nm

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.